



Calma GOLA

Compresse Gola
DISPOSITIVO MEDICO

*PROTEGGE LA GOLA
ALLEVIA IL DOLORE*

1. Identificazione, composizione e finalità del MD

La mucosa delle vie respiratorie è sensibile agli attacchi di agenti patogeni, inquinanti e sostanze irritanti ambientali, che possono penetrare nella faringe, nei bronchi e nei polmoni raggiungendo le vie respiratorie, causando infiammazione ed allergie.

La capacità di creare una barriera protettiva di sostanze con proprietà mucoadesive, contribuisce ad aumentare le difese della mucosa orofaringea.

Calma GOLA compresse è un dispositivo medico utile ad alleviare le irritazioni del tratto respiratorio superiore ed i sintomi comunemente associati come dolore, fastidio alla deglutizione, bruciore, secchezza, tosse e raucedine.

1.1 Meccanismo d'azione

I polisaccaridi contenuti negli estratti vegetali, in sinergia con lo ialuronato di sodio, formano un film mucoadesivo che esercita un'azione protettiva e capace di limitare il contatto con agenti esterni e irritanti.

Calma GOLA compresse è un utile coadiuvante per il trattamento del mal di gola, anche associato a faringite e laringite, in quanto esercita un effetto calmante sulla mucosa irritata.

Calma GOLA compresse è raccomandato anche per la protezione delle membrane mucose da agenti esterni come temperatura fredda, fumo, smog e polvere.

1.2 Composizione

Estratto secco di Plantago major, estratto secco di Erysimum officinalis, estratto secco di liquirizia, estratto secco di menta, ialuronato di sodio, aroma, xilitolo, sorbitolo, magnesio stearato, sucralosio, acesulfame K, biossido di silicio, gomma Karaya, cellulosa microcristallina, coloranti (ossido di ferro giallo, ossido di ferro nero, blu brillante (blu 1), carminio indaco (blu 2)), mentolo.

2. Confezione

Scatola con 24 compresse.

3. Dosaggio e metodo d'uso

Adulti e bambini > 6 anni: fino a 3 compresse al giorno.

Sciogliere lentamente la compressa in bocca.

Non utilizzare sotto i 6 anni di età. Utilizzare il prodotto da 6 a 12 anni solo sotto consiglio medico consigliabile.

4. Effetti collaterali

I componenti di Calma GOLA compresse di solito sono ben tollerati. Non sono noti effetti collaterali causati dal prodotto. In caso di effetti collaterali imprevisti, interrompere il trattamento e consultare il medico.

5. Interazioni con integratori alimentari e farmaci

Per i componenti di Calma GOLA compresse, alle dosi utilizzate nel prodotto, le possibili interazioni potrebbero essere con farmaci cardioattivi salvavita. Non assuma questo prodotto in caso di utilizzo di questa classe di farmaci.

Calma GOLA compresse può interferire con il metabolismo epatico di farmaci come diuretici, anti-asmatici, lassativi, calcitonina, antinfiammatori e contraccettivi.

Si consiglia di consultare il proprio medico in caso di terapie farmacologiche in atto.

In ogni caso, come regola generale, si consiglia di assumere Calma GOLA compresse due ore prima o dopo l'uso di farmaci o integratori alimentari.

6. Avvertenze e precauzioni

Non utilizzare in bambini sotto i 6 anni.

Da 6 a 12 anni solo dopo consiglio medico.

Non usare in caso di gravidanza o allattamento.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Non assumere in caso di intolleranza al prodotto.

Non assumere in caso di ipersensibilità nota ai componenti.

In caso di ernia iatale o stenosi esofagea, consultare il medico prima di iniziare a prendere il prodotto.

A causa della presenza di liquirizia, il prodotto non deve essere assunto da persone ipertese. I pazienti che assumono farmaci a base di liquirizia non devono assumere altri prodotti contenenti liquirizia in quanto possono verificarsi eventi avversi gravi come ritenzione idrica, ipopotassiemia, ipertensione, disturbi del ritmo cardiaco. Consultare il proprio medico per ulteriori informazioni.

In caso di infiammazione cronica della bocca o della faringe, prendere il prodotto solo dopo il parere medico.

Non superare le dosi raccomandate. In caso di effetti avversi sospendere l'uso e consultare il medico.

Non usare se sono presenti gravi lesioni della cavità orale.

Ogni compressa è monouso e dovrebbe essere aperta solo al momento dell'utilizzo.

Non utilizzare Calma GOLA compresse per più di 30 giorni consecutivi, se i sintomi persistono più di 1 settimana durante l'uso del prodotto o ogni volta che è presente la febbre, consultare un medico.

Il mal di gola può essere sintomo di un'infezione.

7. Conservazione

Tenere Calma GOLA compresse in un luogo asciutto e lontano da fonti dirette di calore o luce.

Non usare se il prodotto è danneggiato.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Tenere il dispositivo a temperatura inferiore ai 25 °C.

8. Data di scadenza

Non assumere dopo la data di scadenza stampata sulla confezione.

La data di scadenza si riferisce al prodotto nella sua confezione integra, correttamente conservato.

9. Smaltimento

Il dispositivo scaduto deve essere smaltito secondo le normative locali sulla gestione dei rifiuti.

Non smaltire in nessun caso il prodotto o la sua confezione nell'ambiente.



Distribuito da:

A&D S.p.A. Strada 2 - Pal. C1
20057 Assago - Milanofiori (MI)



SIIT Srl
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano S/N (MI)

Ultima revisione: 04/2025

Matt ti aiuta a riciclare

Foglietto PAP 22 Raccolta **CARTA**

Verifica le disposizioni del tuo Comune

La Tua opinione è importante! Al fine di valutare la Tua soddisfazione per il prodotto, dedica 5 minuti per compilare il breve questionario che trovi al seguente indirizzo siit-pms.com/OC10D oppure scansionando questo QR code:

